

Guia Rápido para o iCheck Carotene

Amostras de Sangue Total e Soro

O que fazer



- Sempre usar luvas.
- Coletar o sangue em tubos que contém anticoagulantes.
- Puxar devagar exatamente 400 μ L para a seringa.



- Garantir que não haja nenhuma bolha de ar dentro da seringa.
- Injetar lentamente 400 μ L pelo septo vermelho do frasco do reagente.



- Agitar vigorosamente o frasco do reagente com a amostra por 10 segundos.
- Deixar o frasco parado por um mínimo de 5 minutos.



- Duas fases distintas devem ser observadas dentro do frasco antes da análise.
- Uma fase limpa de 1 ± 0.2 cm de altura deve ser observada.



- Analisar o frasco com o iCheck Carotene seguindo as instruções do Manual de Usuário.
- Garantir que você esteja no modo de medida certo do dispositivo: Sangue Completo ou Outra Amostra para soro.

O que não fazer

- *Não congelar amostras de sangue total.*

- *Não reutilizar agulhas para evitar lesões.*
- *Não descartar agulhas e seringas usadas no lixo comum. Usar recipientes de resíduos tóxicos especializados.*

- *Não expor o frasco com a amostra à luz do sol direta.*

- *Não analisar o frasco se partículas visíveis estiverem na fase limpa da parte superior.*

- *Não reutilizar o frasco*
- *Não descartar frascos usados no lixo comum. Trate-os como resíduos tóxicos.*

Você gostaria de receber mais informações? Entre em contato conosco via:

contact@bioanalyt.com • Tel.: +49 33 28 35 15 000 • WhatsApp: +49 332 835 150 034
BioAnalyt GmbH • Rheinstr. 17, 14513 Teltow, Germany • www.bioanalyt.com

